



DENTIRO® Wipes

Șervețele dezinfectante complet virulicide, cu un conținut redus de alcool, pentru suprafețe mici.



- ▶ **Distruge 101 agenți patogeni**
- ▶ **Aționează în 60 de secunde**
- ▶ **Compatibil cu 275 materiale, inclusiv pielea artificială**
- ▶ **Uscare fără reziduuri**

DENTIRO® Wipes sunt șervețele impregnate, gata de utilizare, pentru dezinfectarea și curățarea rapidă, fără urme, a echipamentelor medicale neinvazive, cum ar fi mese de operație, paturi mobile, stative pentru perfuzii și scaune stomatologice. Șervețele puternic impregnate au conținut scăzut de alcool, sub 50%, ceea ce reduce riscul de alergii și crește compatibilitatea cu materialele. DENTIRO® Wipes nu conțin aldehide.

Utilizare



Pentru protecția dumneavoastră, purtați mănuși de unică folosință și ochelari de protecție. Umeziți complet și ștergeți în întregime suprafața aparatului medical. Lăsați dezinfectantul să acționeze și respectați timpii de expunere. Folosiți numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Înainte de prima utilizare, testați compatibilitatea cu materialul, prin aplicarea produsului pe o mică zonă ascunsă a acestuia. Pe site-ul nostru web există o listă cu materialele compatibile și incompatibile. Dacă nu sunteți siguri cu privire la compoziția materialelor dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare.

Spectru de eficiență / Timp de expunere



Bactericid	60 secunde
Bacterii rezistente la antibiotice	60 secunde
Tuberculocid	60 secunde
Micobactericid	60 secunde
Levuricid	60 secunde
levuri rezistente la antibiotice	60 secunde
Virusuri încapsulate	15 secunde
BVDV	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virusul hepatitei B	15 secunde
Virus hepatitei C	15 secunde
Virus herpes simplex	15 secunde
HIV	15 secunde
Virus gripal A	15 secunde
Virusuri neîncapsulate	60 secunde
Adenovirus	60 secunde
Norovirus	60 secunde
Poliovirus	60 secunde
Rotavirus	30 secunde

Conform cu EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, Norme RKI / DVV. Testat dermatologic.





Compatibilitate



Policlorură de vinil
 Cauciuc siliconic
 Aluminiu
 Sticlă acrilică
 Polietilenă
 Polipropilenă

Compatibil
 Compatibil
 Compatibil
 Compatibil
 Compatibil
 Compatibil

Pericol



H228 Solid inflamabil. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse.

– Fumatul interzis. P233 Păstrați recipientul închis etanș. P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă, consultați medicul. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

Compoziție per 100 g



31.3 g etanol, 16.7 g izopropanol

Proprietăți fizice



Stare de agregare:	Șervețele impregnate cu lichid
Culoare:	Incolor
Miros:	De alcool
Valoare pH:	Neutru.
Termen de valabilitate:	36 luni (recipient nedeschis)

Formă de prezentare



Pungă de rezervă cu 120 de șervețele dezinfectante (14,5 x 20 cm), parfum clasic, Pungă de rezervă cu 120 de șervețele dezinfectante (14,5 x 20 cm), parfum de lămâie, Pungă de rezervă cu 120 de șervețele dezinfectante (14,5 x 20 cm), parfum floral, DENTIRO Wipes Tub T1 (Tub gol ce), (CH-041079, CH-041083, CH-041084, CH-042081)

Distribuitorul dvs. local



DEZIMED+

S.C. DEZIMED SRL
 Calea 13 Septembrie, nr. 87 Block 79,
 parter, sector 5
 50713 Bucuresti
 România
 Telefon: +40 21 411 60 01
 Fax: +40 21 411 91 17
 office@dezimed.ro
 www.dezimed.ro