



ISORAPID® Spray

Dezinfectant rapid pentru suprafețe cu spectru larg de eficiență, foarte rapid și cu conținut redus de alcool.



- ▶ **Distruge 101 agenți patogeni**
- ▶ **Aționează în 60 de secunde**
- ▶ **Compatibil cu 110 materiale, inclusiv pielea artificială**
- ▶ **Conține mai puțin de 50% alcool**

ISORAPID® Spray este un produs gata de utilizare, fără aldehide, pe bază de alcool, pentru dezinfectarea și curățarea rapidă prin pulverizare și ștergere a obiectelor medicale neinvazive, cum ar fi mese de operație, paturi mobile, stative pentru perfuzii și scaune stomatologice. ISORAPID® Spray are un conținut scăzut de alcool, mai mic de 50%, care reduce semnificativ riscul de alergii și iritații ale pielii, mărind în același timp compatibilitatea cu materialele. ISORAPID® Spray are un parfum proaspăt, floral.

Utilizare



Pentru protecția dumneavoastră, purtați mănuși de unică folosință și ochelari de protecție. Umeziți complet și ștergeți în întregime suprafața aparatului medical. Lăsați dezinfectantul să acționeze și respectați timpii de expunere. Folosiți numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Înainte de prima utilizare, testați compatibilitatea cu materialul, prin aplicarea produsului pe o mică zonă ascunsă a acestuia. Pe site-ul nostru web există o listă cu materialele compatibile și incompatibile. Dacă nu sunteți siguri cu privire la compoziția materialelor dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare.

Spectru de eficiență / Timp de expunere

Bactericid	60 secunde
Bacterii rezistente la antibiotice	60 secunde
Tuberculocid	60 secunde
Micobactericid	60 secunde
Levuricid	60 secunde
levuri rezistente la antibiotice	60 secunde
Virusuri încapsulate	15 secunde
BVDV	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virusul hepatitei B	15 secunde
Virus hepatitei C	15 secunde
Virus herpes simplex	15 secunde
HIV	15 secunde
Virus gripal A	15 secunde
Virusuri neîncapsulate	60 secunde
Adenovirus	30 secunde
Norovirus	30 secunde
Poliovirus	60 secunde

Conform cu EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, Norme RKI / DVV.





Compatibilitate



Polietilenă
Polipropilenă
Policlorură de vinil

Compatibil
Compatibil
Compatibil

Pericol



H226 Lichid și vapori inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P233 Păstrați recipientul închis etanș. P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

Compoziție per 100 g



20 g etanol, 28 g 1-propanol,
0.056 g compuși cuaternari de amoniu

Proprietăți fizice



Stare de agregare:	Lichid lipsit de vâscozitate, transparent
Culoare:	Incolor
Miros:	De alcool, floral
Valoare pH:	Neutru.
Termen de valabilitate:	48 luni (recipient nedeschis) Nu se aplică. (soluție de lucru în zu)

Formă de prezentare



Flacon de 250 ml, Flacon de 1 litru cu capac cu clapetă, Flacon de 2 litri, canistră de 5 litri

Distribuitorul dvs. local



DEZIMED+

S.C. DEZIMED SRL
Calea 13 Septembrie, nr. 87 Block 79,
parter, sector 5
50713 Bucuresti
România
Telefon: +40 21 411 60 01
Fax: +40 21 411 91 17
office@dezimed.ro
www.dezimed.ro